



V-Print IBT

Indikationen / Indications

Orthodontische Transferschienen für die Bracketplatzierung / Orthodontic transfer splints for bracket placement

3D-Druck / 3D printing				Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
Drucker-hersteller / manufacturer	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO ¹	SolFlex 170 [SMP] SolFlex 350 [SMP] SolFlex 650 [SMP] SolFlex 170 HD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 30 min
						Hilite power 3D	2 × 5 min
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 30 min
						Hilite power 3D	2 × 5 min
W2P ¹	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD SolFlex 250 UHD	100	Normal SE	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 30 min.
						Hilite power 3D	2 × 5 min
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
						Next Dent LC Box	1 × 30 min
						Hilite power 3D	2 × 5 min
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				RS Wash	V-Print IBT	RS Cure / RS Cure US	V-Print IBT
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
DMG	3Delite 3Demax	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				DMG 3Dewash	V-Print IBT	3Decure	V-Print IBT
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Shera	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				SHERAprint-wash	V-Print IBT	SHERAprint-cure	V-Print IBT
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				P wash	V-Print IBT	P cure / P cure US	V-Print IBT
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				D wash	V-Print IBT	D cure	V-Print IBT
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
UNIZ Technology	NBEE	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
DENTAL MAKERS	LightBuilder 4K	100	×	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 3 min.	OtoFlash G171 (280N2 Schale / tray)	2 × 2000 flashes ²

× = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

¹ nur mit PowerVat / only with PowerVat ² Schutzgas empfohlen / N₂ recommended

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental